

Le Programme Elipse™

1. Les patients en surpoids ne sont pas satisfaits des traitements actuels
2. Comment fonctionne le Ballon Elipse™
3. Une perte de poids entre 13 et 15 kg^{1,2}
4. Informations sur la sécurité du Ballon Elipse™

1. Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
2. Al Sabgh et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001

Le Programme Elipse, vers une nouvelle vie

Perdez votre surpoids
sans chirurgie, ni endoscopie,
ni anesthésie*

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si le Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur www.allurion.com.

Quelle est votre histoire ?

- 01** Pourquoi voulez-vous perdre du poids ?
Pourquoi avec le Programme Elipse ?
- 02** Comment expliqueriez-vous votre prise de poids ?
- 03** A quelle solution avez-vous déjà eu recours pour perdre du poids ?
- 04** Souhaitez-vous perdre du poids en vue d'un évènement particulier ?
- 05** Sur une échelle de 1 à 5*, comment évalueriez-vous votre degré de satisfaction pour votre corps ?
- 06** Comment avez-vous entendu parler du centre et du Programme Elipse ?

IMC ?

Calculez votre indice de masse corporelle


L'indice de masse corporelle (IMC) mesure la graisse corporelle d'après la taille et le poids d'adultes.
L'IMC correspond au calcul du poids (kg) divisé par la taille (m) au carré.

$$\text{IMC} = \frac{\text{poids (kg)}}{\text{taille}^2 \text{ (m)}}$$

Vous n'êtes pas seul(e)

Surpoids et obésité, une épidémie globale


1 personne sur 3 est en surpoids ou obèse aux États-Unis, dans l'UE5, en Chine et dans les Emirats Arabes Unis.*

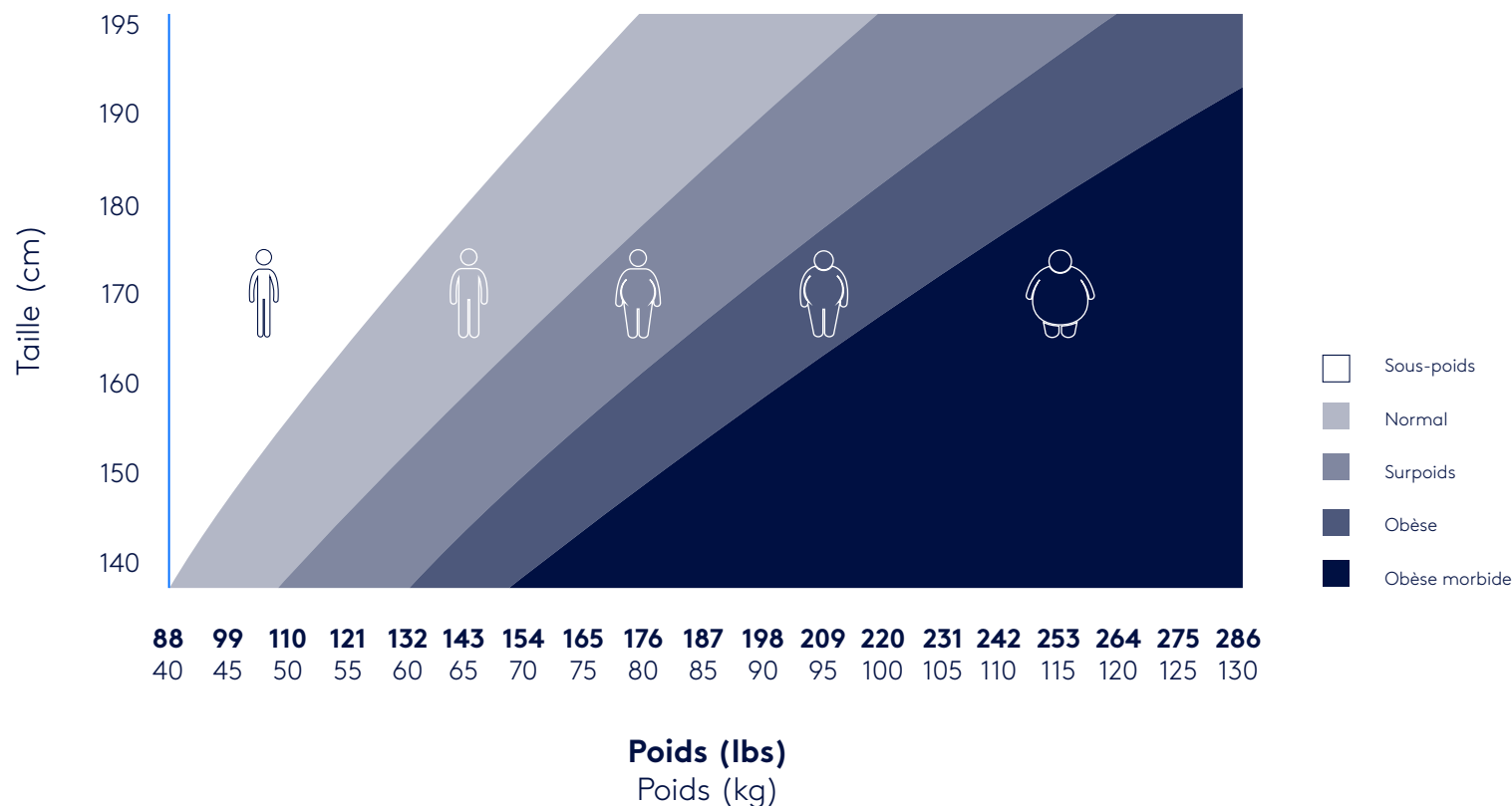

Que risquons-nous en étant obèse ou en surpoids ?

Le surpoids a un impact sérieux sur la santé, pas seulement sur notre aspect physique et notre moral

RISQUES RELATIFS DE COMORBIDITÉ
LIÉS AU SURPOIDS OU À L'OBÉSITÉ

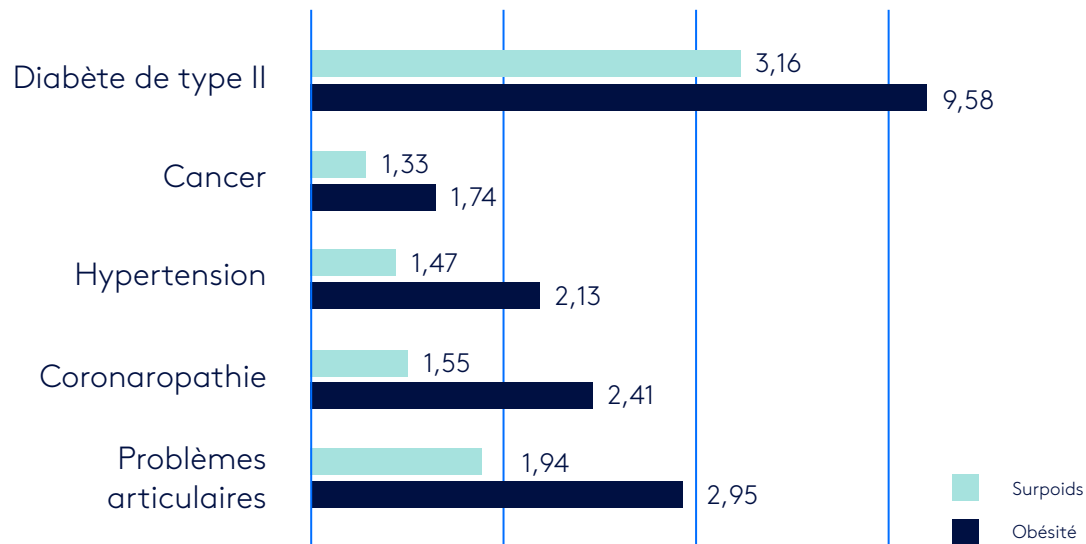

55%

L'obésité entraîne une augmentation de 55 % du risque de dépression¹

4x

Les personnes obèses présentent 4 fois plus de risque de développer une comorbidité²


2x

Les personnes en surpoids présentent 2 fois plus de risque de développer une comorbidité²

1. JAMA Psychiatry, Overweight, Obesity, and Depression: A Systematic Review and Meta-analysis of Longitudinal Studies, 2010
2. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight, 2009, <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/88>.
En moyenne, les personnes en surpoids et les personnes obèses ont respectivement 1.89 fois et 3.76 fois plus de risque de développer une comorbidité.


Existe-t-il des solutions satisfaisantes ?

La plupart des options de traitements disponibles ne répondent pas aux attentes des personnes concernées

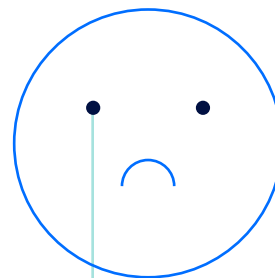

SATISFACTION VIS-À-VIS DES SOLUTIONS DE PP (PERTE DE POIDS)

Notées de 1 à 10 - par ceux qui ont eu recours au :

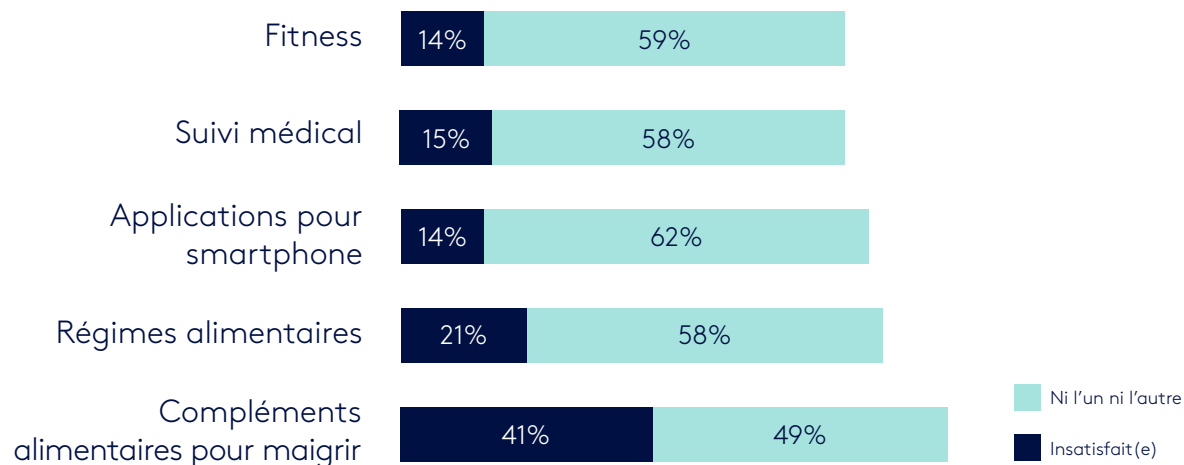

76%

ne sont pas pleinement satisfaites des solutions de perte de poids déjà essayées

Étude de marché Allurion ; 9 800 répondants; 8 zones géographiques ; oct. 2018 Q3C. Sur une échelle de 1 à 10 où 1 correspond à Pas du tout satisfait(e) et 10 à Extrêmement satisfait(e), dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de ce qui suit ? Pensez à votre expérience globale. Niveau global. Base : n = 4831 Satisfait(e) : 8-10/10, Ni l'un ni l'autre : 4-7/10, Insatisfait(e) : 1-3/10

En quoi le Programme Elipse est une solution ?

Le Programme de perte de poids Elipse : l'efficacité prouvée et la commodité d'une procédure ambulatoire sans chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie

01

Perdez du poids sans ressentir la frustration des régimes

- Une perte de poids moyenne de 13 à 15 kg en 16 semaines^{1,2}
- Amélioration des indicateurs de santé et de qualité de vie¹

1. Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
2. Al Sabah et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001
Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne réagit pas au traitement.

02

Obtenez un soutien pluridisciplinaire pendant votre parcours de perte de poids

- Soutien constant de votre équipe médicale et diététique*
- Partagez vos résultats avec votre équipe de suivi grâce à une balance «intelligente» et une application mobile

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

03


Découvrez sa simplicité révolutionnaire : sans chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie

- Profitez de l'intimité d'une procédure ambulatoire : personne de votre entourage n'a besoin d'être au courant
- Mis en place lors d'une courte procédure ambulatoire de 20 minutes
- À la fin du traitement, le ballon se vide de lui-même et est éliminé naturellement**

**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si le Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur www.allurion.com

Comment ça marche ?

Le Ballon Elipse vous aide à atteindre vos objectifs de perte de poids sans ressentir la faim*

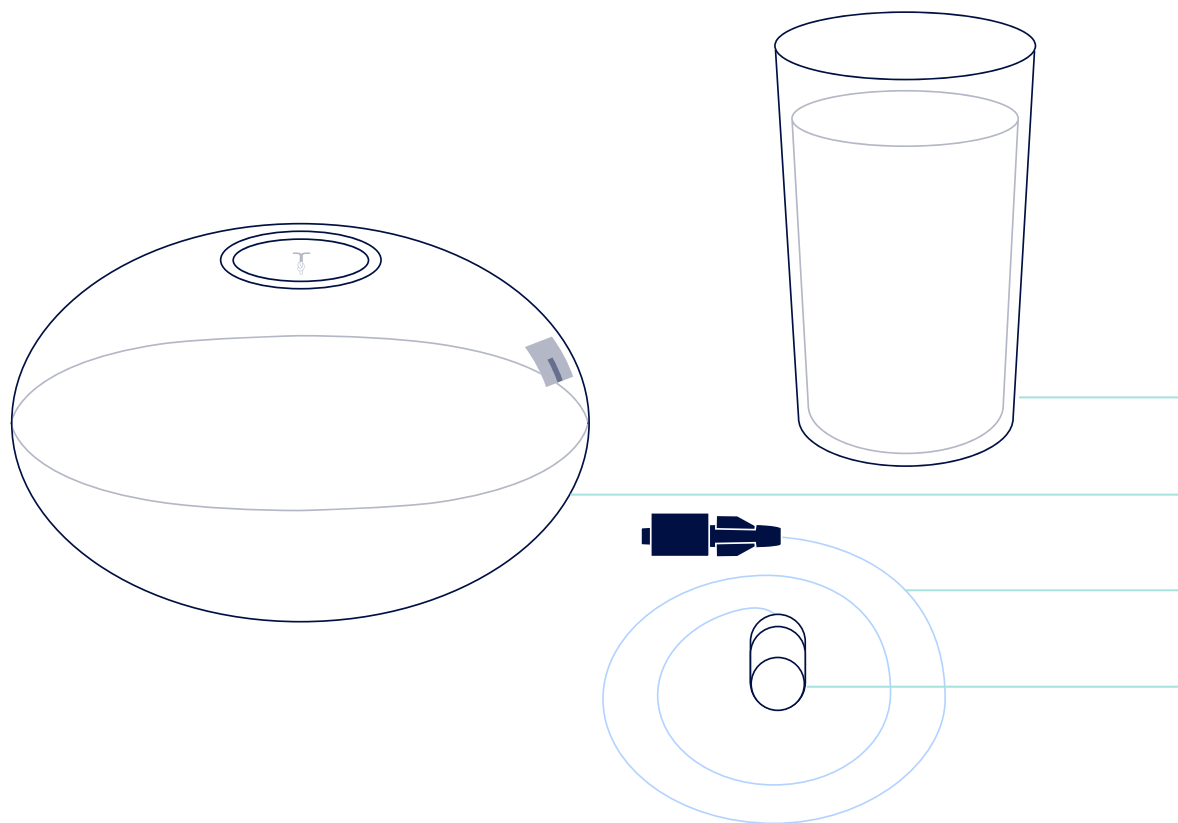


20_{min}


Le Ballon Elipse est mis en place lors d'une courte procédure ambulatoire de 20 minutes

Comment ça marche ?


Le Ballon Eipse vous aide à atteindre vos objectifs de perte de poids sans ressentir la faim

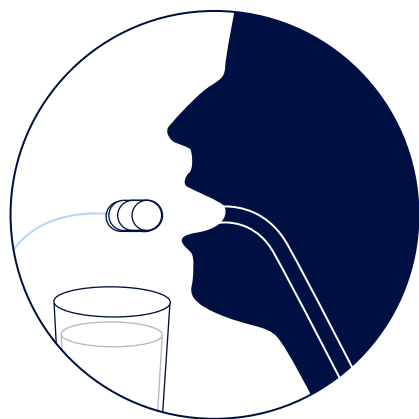

1. Vous avalez une capsule qui contient le ballon relié à un mince cathéter.

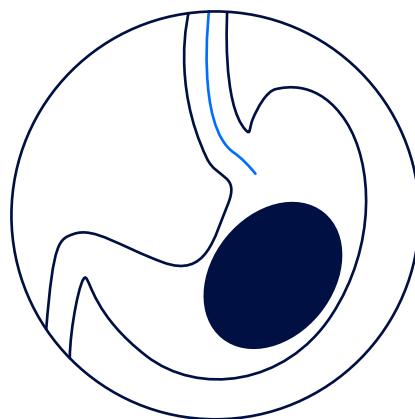

2. Une fois celui-ci dans votre estomac, le médecin utilisera le cathéter pour remplir le ballon de liquide, le retirera doucement et vous serez sur la voie de la réussite. Avec le ballon dans votre estomac, vous pouvez manger moins sans ressentir la faim.

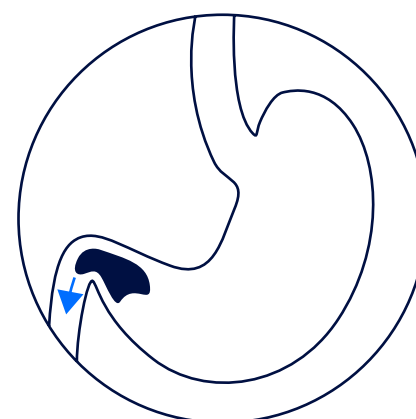

3. Au bout d'environ quatre mois, la valve du ballon s'ouvrira, lui permettant de se vider et d'être évacué naturellement.*

*Le retrait du Ballon Eipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si le Programme Eipse est fait pour vous. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur www.allurion.com


DC00924

Soutien d'experts

Le Ballon Elipse est au centre d'un programme de perte de poids pluridisciplinaire



Supervision
de votre médecin

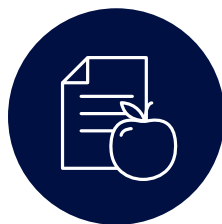

6 mois de coaching
diététique avec
un diététicien/
nutritionniste qualifié*




Une balance
« intelligente »
connectée
et une application
pour Smartphone
pour suivre vos progrès

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Programme

Un programme complet de perte de poids*

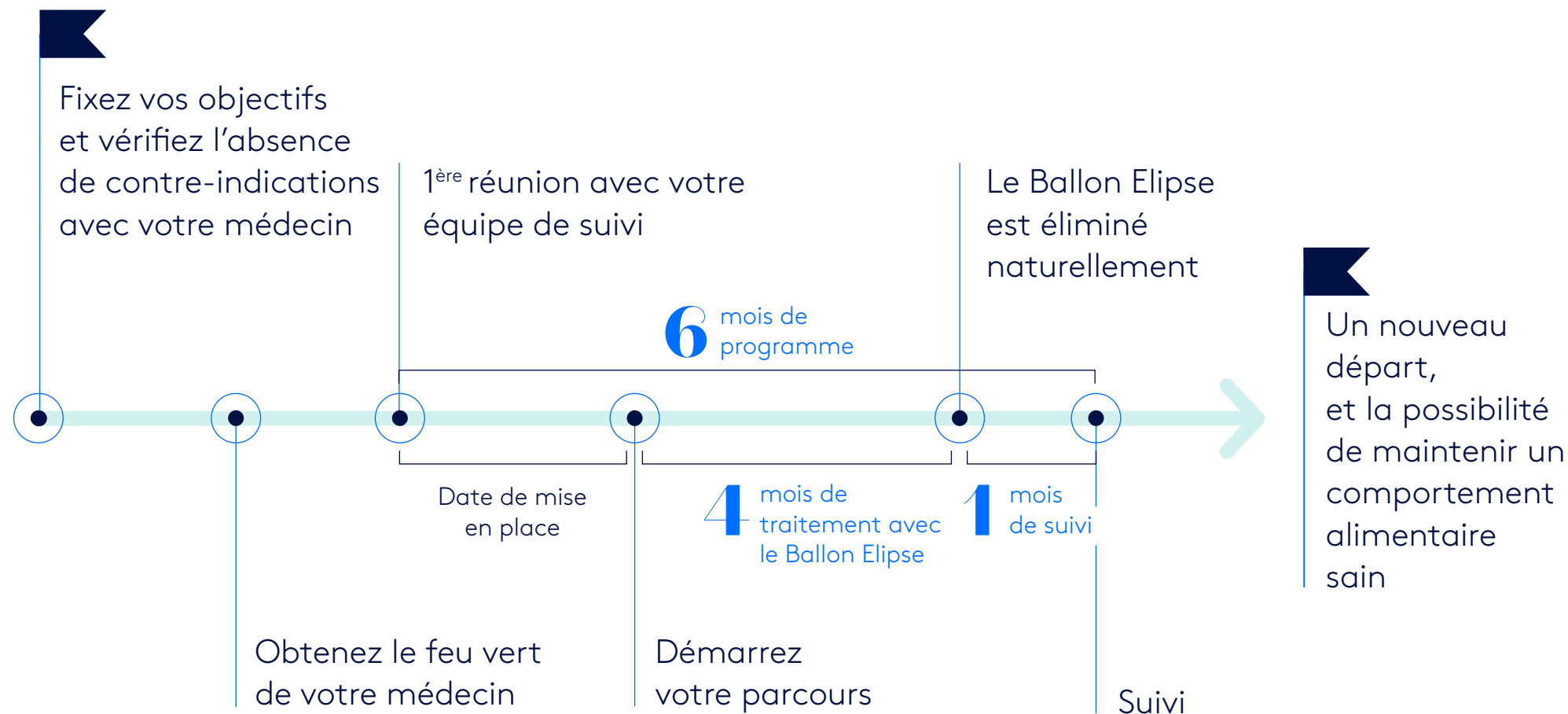

*Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les antécédents médicaux dans le détail et effectuent un examen physique pour déterminer l'éligibilité du patient. Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont obèses ou en surpoids, tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27 . Le Ballon Elipse peut seulement être mis en place par un professionnel de la santé qui sait comment utiliser le Ballon Elipse.

APM088-02


Rev 1

Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient. *Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

DCO0924

13 à 15 kg en moins*

Perdez en moyenne entre 13 et 15 kg en 16 semaines de traitement avec le Ballon Elipse^{1,2}

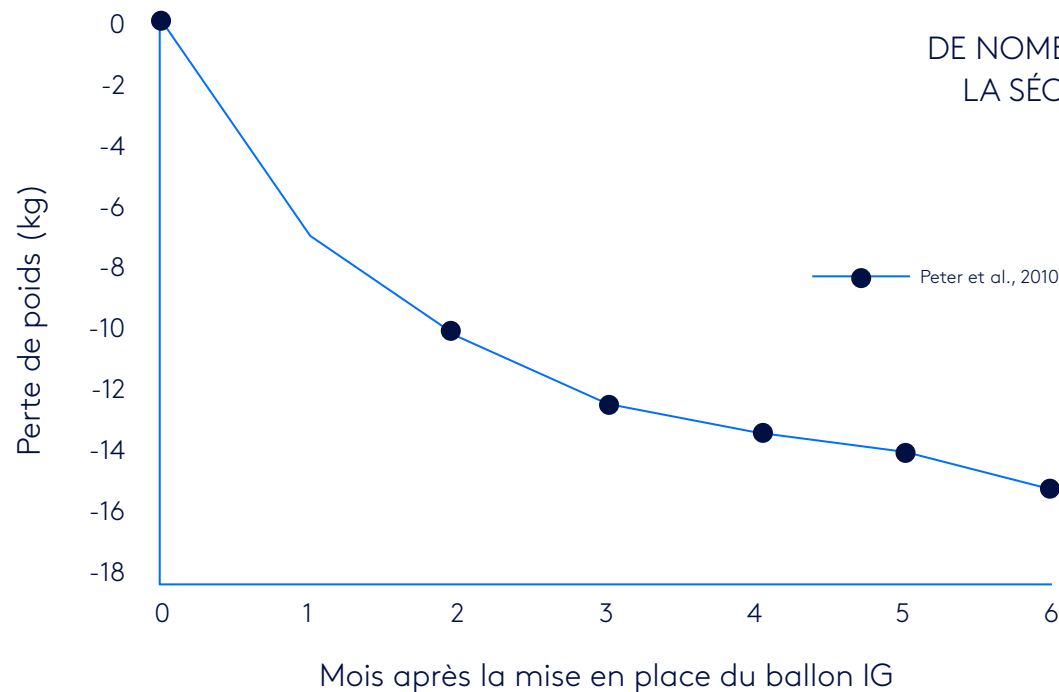

COURBE DE PERTE DE POIDS APRÈS LA MISE EN PLACE DU BALLON IG

5 publications
EMEA

Année de publication	2017
N(total)	270
IMC moyen de départ (kg/m ²)	32,1-38,6
Perte de poids	12,7-15,4 kg
PP totale	10-15%

DE NOMBREUSES PUBLICATIONS DÉMONTRENT LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ D'ELIPSE^{1,2,3,4,5}

80%

de la perte de poids a lieu au cours des trois premiers mois⁶

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

1. Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

2. Al Sabah et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001

3. Endosc (2017) 49:154-60

4. Obes Surg (2018) 28:405-9

5. Int J Surg (2017) 48:16-22

6. Gaur et al. 2015, GI Endoscopy

Que se passe-t-il ensuite ?

Et si je n'arrive pas à avaler la capsule ?

Possibilité d'être assisté(e) par le médecin

- La plupart des personnes réussissent à avaler la capsule.
- Si vous avez du mal à l'avaler, vous pourrez être aidé(e) par votre médecin qui utilisera un fil-guide.

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les antécédents médicaux dans le détail et effectuent un examen physique pour déterminer l'éligibilité du patient. Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont obèses ou en surpoids, tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27 .

Le Ballon Elipse peut seulement être mis en place par un professionnel de la santé qui sait comment utiliser le Ballon Elipse.

Pourrai-je reprendre mes activités quotidiennes après la mise en place ?

Les effets secondaires courants se produisent dans les 3 premiers jours

- Dans la plupart des cas, les symptômes sont atténués avec les médicaments prescrits par le médecin et disparaissent après 3 jours dans la majorité des cas.
- La plupart des personnes sont en mesure de reprendre leurs activités quotidiennes après un jour ou deux.



Méta-analyse de 80 études incluant 8 506 patients
Retrait précoce : 7,5 %
Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015; 82(3):425-438

Que se passe-t-il ensuite ?

Que se passe-t-il au moment où le ballon est éliminé ?

Vos efforts sont essentiels pour continuer à gérer votre poids

- Le soutien de votre équipe soignante continue pendant un mois pour consolider vos nouvelles habitudes de vie*
- Utilisez votre balance Elipse et votre application mobile pour suivre vos progrès



*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.


Rev 1

Sécurité

Bon rapport
bénéfices/risques

98_{,51}%

Aucun événement
indésirable

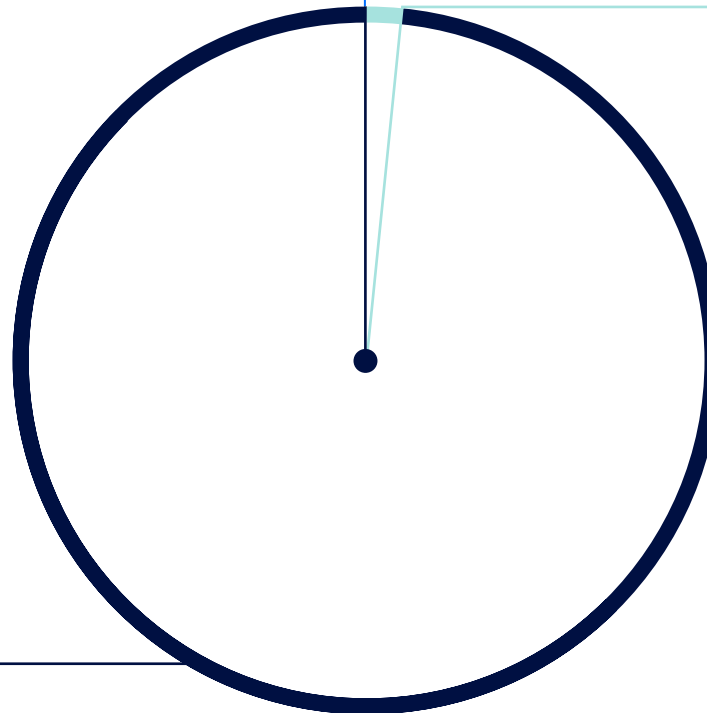

TAUX D'ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES (%)
MARS 2016 - SEPT. 2018

Dégonflement précoce 0,6%
Intolérance 0,5%
Occlusion de l'intestin grêle 0,18%
Hyperinflation 0,12%
Sténose du défilé gastrique 0,04%
Pancréatite 0,03%
Perforation gastrique 0,01%

Total d'unités distribuées = 9 320

Dans de rares cas,
le ballon peut être
éliminé en vomissant,
sans risques pour la santé

Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015; 82(3):425-438

1. Apollo Endosurgery Orbera® Gastric Balloon IFU

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les antécédents médicaux dans le détail et

effectuent un examen physique pour déterminer l'éligibilité du patient. Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont obèses ou en surpoids, tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27 . Le Ballon Elipse peut seulement être mis en place par un professionnel de la santé qui sait comment utiliser le Ballon Elipse.


Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

DCO0924

Vers une meilleure santé*



Des bienfaits pour la santé, notamment une amélioration du taux de glycémie, une baisse du cholestérol et une diminution de la tension artérielle¹

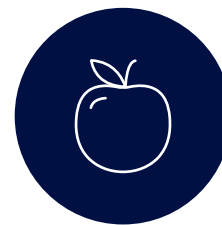

Une amélioration importante de la qualité de vie dans tous les domaines¹

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

1. Physical function, self-esteem, sexual life, public distress, work
Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

Démarrez votre histoire aujourd'hui

01

Perdez du poids sans ressentir la frustration des régimes

02

Obtenez un soutien pluridisciplinaire pendant votre parcours de perte de poids*

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Rev 1

03

Découvrez sa simplicité révolutionnaire**

**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les antécédents médicaux dans le détail et effectuent un examen physique pour déterminer l'éligibilité du patient. Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont obèses ou en surpoids, tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27 . Le Ballon Elipse peut seulement être mis en place par un professionnel de la santé qui sait comment utiliser le Ballon Elipse.

DCO0924

